

FR

INNOVATION

Dolicare SKiN[®]

SOULAGE LA DOULEUR

DÉCOUVREZ
NOTRE GAMME COMPLÈTE

COUSSIN THERMIQUE DE MICROBILLES DE GEL
COUSSIN DE GEL THERMIQUE

COMMENT BIEN UTILISER LE PRODUIT DOLICARE SKiN[®] ?



LABORATOIRES[®]
AXAMED


COUSSINS THÉRAPEUTIQUES / CHAUD ET FROID

Les coussins thermiques **Dolicare Skin®** contenant des microbilles de gel permettent le traitement la douleur par le froid ou par le chaud, ce qui améliore l'inconfort et diminue les éventuelles douleurs du quotidien.

COUSSIN DE MICROBILLES DE GEL

AX-HP1 CODE **02** 

11 x 27 CM • MULTIZONE

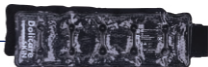

Soulage : Les douleurs musculaires, diverses douleurs rhumatologiques, les raideurs articulaires, les douleurs d'activité d'échauffement.



Soulage : Les entorses, les ecchymoses, les douleurs inflammatoires, les spasmes musculaires, les maux de dents.

AX-HP2 CODE **02** 

10 x 15 CM • MULTIZONE



Soulage : Les douleurs musculaires, diverses douleurs rhumatologiques, les raideurs articulaires, les douleurs d'activité d'échauffement.



Soulage : Les entorses, les ecchymoses, les douleurs inflammatoires, les spasmes musculaires, les maux de dents.

AX-HP3

CODE **04**

20 x 30 CM
MULTIZONE



Soulage : Les douleurs musculaires, diverses douleurs rhumatologiques, les raideurs articulaires, les douleurs d'activité d'échauffement.



Soulage : Les entorses, les ecchymoses, les douleurs inflammatoires, les spasmes musculaires, les maux de dents.

AX-HP4

CODE **02**

10 x 20 CM
MASQUE OCULAIRE



Soulage : L'inflammation des sinus, sécheresse oculaire, la rosacée oculaire.



Soulage : Les sinusites, migraines ophtalmiques, l'oedème palpébral (yeux gonflés), l'eczéma de contact, post opératoire, la fatigue oculaire, effet tonifiant.

Existe en 4 couleurs



AX-HP5 CODE **05** 

32 x 45 CM
ÉPAULES - CERVICALES



Soulage : Les douleurs et les raideurs cervicales, les torticolis, de la nuque, les contractures musculaires.



Soulage : Les douleurs au niveau des épaules et des trapèzes.

AX-HP6 CODE **03** 

30 x 22 CM
GENOU



Soulage : L'arthrose, les spasmes musculaires.



Soulage : Les douleurs articulaires, les raideurs ou courbatures, l'arthrite, les inflammations post chirurgie, les hématomes, les entorses.

AX-HP7 CODE **04** 

17 x 45 CM
LOMBAIRES / ABDOMEN



Soulage : Les douleurs lombaires, le mal de dos, la sciatique, les crampes et les spasmes musculaires de l'abdomen, les douleurs menstruelles.



Soulage : Les coups, les hématomes, les déchirures, les inflammations.

AX-HP8CODE **02** **11 x 35 CM**

COUDE - POIGNET - CHEVILLE

**Soulage :** Les douleurs musculaires, les courbatures, l'arthrose, les douleurs d'activité d'échauffement.**Soulage :** Les entorses, les déchirures, les tendinites, l'arthrite, le syndrome du canal carpien, les hématomes.**AX-HP9**CODE **01** **12 x 8 CM**

MULTIZONE

**Soulage :** Les petits maux de ventre (colique du nourrisson).**Soulage :** Les petites douleurs, les bleus et les bosses, les légères brûlures, les piqûres d'insectes, la fièvre et les maux de tête.

Existe en 3 couleurs

**AX-HP10**CODE **02** **10 x 35 CM**

SINUS - FRONT - TEMPES

**Soulage :** Les tensions musculaires, les sinusites.**Soulage :** Les douleurs sinusales, les douleurs migraineuses, les inflammations.

CHEVILLÈRE & GENOUILLÈRE AVEC COUSSIN DE GEL THERMIQUE

**CHEVILLÈRE
DE MAINTIEN
AVEC COUSSIN
DE GEL THERMIQUE**



**GENOUILLÈRE
DE MAINTIEN
AVEC COUSSIN
DE GEL THERMIQUE**



**DOULEURS DÉCHIRURES
ENTORSES
TENDINITES**

Traitement naturel
Maintien renforcé
de la cheville
Action prolongée
Ergonomique et flexible
Réutilisable

**DOULEURS MUSCULAIRES
ENTORSES - ARTHRITE
INFLAMMATIONS**

Traitement naturel
Maintien renforcé du genou
Action prolongée
Ergonomique et flexible
Réutilisable

DOULEURS DÉCHIRURES ENTORSES - TENDINITES

AX-HPC26 CODE **02** 

39,5 x 9 CM

CHEVILLÈRE DE MAINTIEN
AVEC COUSSIN DE GEL THERMIQUE



Soulage : Les raideurs articulaires et musculaires, les tendinites du tendon d'Achille, les arthrites et douleurs à la cheville, les courbatures.



Soulage : Les gonflements et inflammations, les blessures sportives, les entorses et contusions articulaires, les spasmes musculaires.



Coussin de gel thermique



Chevillère de maintien en néoprène avec scratch de fixation

DOULEURS MUSCULAIRES ENTORSES - ARTHRITE INFLAMMATIONS

AX-HPG90 CODE **02** 

90 x 27 CM

**GENOUILÈRE DE MAINTIEN
AVEC COUSSIN DE GEL THERMIQUE**



Soulage : Les raideurs ou courbatures, les raideurs articulaires/musculaires, les gonflements et fatigues musculaires, les douleurs musculaires.



Soulage : Les douleurs et démangeaisons, avant et après l'entraînement, les douleurs articulaires et blessures sportives, les gonflements et entorses, les spasmes et tensions musculaires.



2 coussins de gel thermique



Genouillère de maintien en néoprène avec scratch de fixation

Dolicare

SKiN[®]

SOULAGE LA DOULEUR

Dispositif médical de classe I
Conforme aux normes européennes en vigueur



INDICATIONS

BIENFAITS DE LA THÉRAPIE PAR LA CHALEUR :



La thérapie par la chaleur favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui augmente la circulation

sanguine. Une circulation sanguine accrue entraîne un apport d'oxygène et de nutriments aux tissus où la source de chaleur est appliquée. L'élimination des déchets cellulaires est ainsi facilitée. Les éventuels spasmes musculaires devraient diminuer après l'application de la thérapie par la chaleur.

BIENFAITS DE LA THÉRAPIE PAR LE FROID :



La thérapie par le froid est recommandée pour soulager les blessures avec un effet thérapeutique. Dans la plupart des cas, la thérapie par le froid est le premier soin appliqué immédiatement pour les blessures liées au sport. Elle permet de réduire le gonflement, de minimiser l'inflammation, ainsi que de diminuer la douleur et l'inconfort. Passer de la thérapie par le chaud à la thérapie par le froid peut également aider à la guérison après l'application initiale du chaud ou du froid.

UTILISATION

Conserver la notice pendant toute la durée de vie du produit.

Remarque : Sortez le coussin thermique de son emballage plastique avant de le chauffer ou de le refroidir.

THERMOTHÉRAPIE PAR LE FROID :

1- Placez le coussin thermique au congélateur ou au réfrigérateur pendant au moins deux heures avant son utilisation.

THERMOTHÉRAPIE PAR LE CHAUD :

2 façons de réchauffer votre coussin thermique.

• **Au micro-ondes, selon le code de chauffe indiqué sur votre produit (se référer au tableau ci-dessous).**

1- Commencez avec le coussin thermique à température ambiante. **2-** Chauffez au four à micro-ondes en respectant la température et le temps de chauffe indiqués. **3-** Enveloppez le coussin thermique dans du papier essuie-tout ou un linge humide, puis placez-le au centre du plateau tournant du four à micro-ondes sans qu'il touche les parois. Assurez-vous que toutes les fonctions avancées du four à micro-ondes sont désactivées, par exemple la fonction « Grill ». **4-** Avant d'appliquer le coussin thermique, vérifiez que sa température est adaptée. **5-** S'il n'est pas assez chaud, chauffez-le davantage pendant le temps supplémentaire indiqué dans le tableau. Avant de réchauffer le coussin thermique, assurez-vous que la température de certaines parties de celui-ci ne soit pas trop élevée. Il s'agit générale-

ment des bords du coussin thermique. Le cas échéant, malaxez-le pour uniformiser la température, puis retournez le coussin thermique et réchauffez-le au four à micro-ondes.

• **Vous pouvez également chauffer votre coussin thermique en le plongeant dans de l'eau chaude selon les instructions suivantes.**

1- Mettez le coussin thermique dans de l'eau chaude à l'écart de la source de chaleur (par exemple, la gazinière) pendant environ 1 à 2 minutes. **2-** Sortez-le soigneusement de l'eau à l'aide de pinces ou d'un autre ustensile approprié. Avant d'appliquer le coussin thermique, vérifiez que sa température est adaptée.



Remarques : La chevillère et la genouillère ne doivent pas être plongées dans l'eau chaude.

AVERTISSEMENTS

Afin d'éviter toute erreur d'utilisation, lire attentivement la notice.



- Faire attention en sortant le coussin thermique du four à micro-ondes, il peut être très chaud.
- Pour éviter les gelures ou les brûlures, ne pas appliquer le coussin thermique avant qu'il n'atteigne une température que votre peau peut supporter.
- Ne pas appliquer plus de 20 minutes à chaque fois, en faisant une pause de 20 minutes entre chaque application.

• NE PAS utiliser en dormant. Vérifier fréquemment la peau pendant l'utilisation. • NE PAS utiliser sur une peau en mauvaise santé, abîmée ou blessée, ni à chaud sur des ecchymoses ou des gonflements survenus dans les 48 heures ou sur une partie du corps insensible à la chaleur ou au froid ou avec d'autres sources de chaleur et/ou de froid. • NE PAS utiliser sur des personnes incapables de retirer elles-mêmes le produit, notamment les enfants, les nourrissons et les personnes âgées, ou sur des personnes incapables de suivre toutes les instructions d'utilisation.

• NE PAS chauffer excessivement. • NE PAS exercer de pression excessive sur le produit. • NE PAS avaler. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. • NE PAS utiliser si le contenu du coussin thermique froid fuit ou si l'enveloppe est endommagée ou déchirée. En cas de contact du contenu du coussin thermique de gel froid avec les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. • Cesser l'utilisation et consulter un médecin si la douleur s'aggrave ou persiste pendant plus de 7 jours, ou si vous ressentez une gêne, une sensation de brûlure, un gonflement, une éruption cutanée ou d'autres modifications de votre peau. • Demander l'avis d'un médecin avant toute utilisation si vous souffrez de diabète, d'une mauvaise circulation ou d'une maladie sensible à la chaleur, d'arthrite rhumatoïde ou si vous êtes enceinte.



TEMPS DE CHAUFFE RECOMMANDÉ

CODE DU PRODUIT	PUISSANCE (WATTS)	TEMPS DE CHAUFFE RECOMMANDÉ	TEMPS DE CHAUFFE SUPPLÉMENTAIRE PAR TRANCHE
01	700 Watts	10 sec	+ 05 sec
	1000 Watts	05 sec	+ 05 sec
02	700 Watts	15 sec	+ 05 sec
	1000 Watts	10 sec	+ 05 sec
03	700 Watts	30 sec	+ 10 sec
	1000 Watts	20 sec	+ 05 sec
04	700 Watts	40 sec	+ 10 sec
	1000 Watts	30 sec	+ 05 sec
05	700 Watts	50 sec	+ 15 sec
	1000 Watts	40 sec	+ 10 sec

Lire la notice avant utilisation. Malaxer le coussin avant de le réchauffer pour répartir uniformément la température.

COMPOSITION

Extérieur du produit : PVC et 100% Polyester.

Intérieur du produit : Glycérine, eau, Polyacrylate de Sodium.

SÉCURITÉ

Ce produit ne peut-être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné (voir début de la notice).

CONSERVATION ET NETTOYAGE

Pour une meilleure conservation du coussin thermique **Dolicare Skin®**, il est conseillé de conserver le produit dans son emballage plastique durant son NON utilisation.

Nettoyez le coussin thermique avec un linge humide et laissez-le sécher. Le coussin thermique n'est pas lavable en machine. Jetez le coussin thermique en cas de signes de dommages, de déchirures ou de trous.

MÉTHODE D'ÉLIMINATION

Ce matériau n'est pas un déchet dangereux. Veuillez éliminer le coussin thermique conformément aux réglementations locales.



NOS MODÈLES

**AX-HP1 - AX-HP2 - AX-HP3 - AX-HP4 - AX-HP5
AX-HP6 - AX-HP7 - AX-HP8 - AX-HP9 - AX-HP10
AX-HPC26 - AX-HPG90**



Laboratoires AXAMED® SAS

HealthCare Innovation Partner

10, rue Mesnil - 75116 PARIS - FRANCE

contact@axamed-lab.com

www.axamed-lab.com



© 12/2020 AXAMED SAS, photos non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable. Marques et modèle déposés.